

## FICHA TÉCNICA

### JABÓN MULTIENZIMÁTICO

Cód. DPF-057 – V. 1.0 – 2016/06/06



El **DETERGENTE LÍQUIDO MULTIENZIMÁTICO** cumple una función de remoción y degradación de desechos celulares, tejidos, grasa, sangre, proteínas, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de material orgánico presente en equipos médicos, áreas y superficies. Es ideal para el lavado de instrumental quirúrgico, laparoscópico y odontológico, proporcionando al instrumental un excelente nivel de limpieza. De igual forma, el producto se puede aplicar para el lavado de espacios u objetos que han sido expuestos a cargas de materia orgánica fuerte. No es tóxico, ni irritante, listo para usar.

 **REGISTRO SANITARIO INVIMA: No Requiere.**

#### **COMPOSICIÓN**

Este producto está compuesto por:

- ✓ Tensoactivo no iónico y catiónico
- ✓ Enzimas: Proteasas, lipasa, amilasas.
- ✓ Espesantes
- ✓ Preservantes
- ✓ Excipientes

#### **PRESENTACIONES**

250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL, 209 L o 55 gal. Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

#### **USOS**

Se aplica en el lavado de dispositivos médicos, instrumental, equipos, áreas y superficies en el sector clínico-odontológico, hospitalario y afines, con elevada presencia de materia orgánica (sangre, carbohidratos, y cualquier otro fluido corporal).

Algunas de los lugares adicionales en los cuales se puede utilizar el producto son:

- Instituciones educativas (Guarderías y colegios), hoteles, geriátricos y funerarias.
- Cocinas y casinos de hospitales, clínicas e instituciones afines; utensilios y superficies en contacto con alimentos (mesones, equipos, lavaplatos, cubiertos).

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Adicionar 10 ml de jabón por cada litro de agua.
2. Sumergir el instrumental de 10 a 15 minutos.
3. Si el instrumental presenta exceso de residuos de materia orgánica, frotar con una esponja o cepillo suave para retirar dicho excedente. No olvide verificar que la solución llegue a todos los canales del instrumento.



## FICHA TÉCNICA

### JABÓN MULTIENZIMÁTICO

Cód. DPF-057 – V. 1.0 – 2016/06/06

4. Enjuagar completamente el instrumental con abundante agua, asegurándose de eliminar todos los residuos del detergente.
5. Secar el instrumental y continuar la desinfección y/o esterilización.
6. Desechar la solución utilizada.

#### VIDA ÚTIL:

La vida útil de este producto es de **24 meses** (según análisis de Estabilidad) conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- ✓ Evite el contacto con los ojos. En tal caso lavar con abundante agua.
- ✓ Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. En caso de ocurrir algún derrame, limpiar inmediatamente.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto no genera irritación o reacciones alérgicas en la piel. Si tiene piel sensible a los compuestos de este y llega a presentar alguna reacción anormal utilice guantes para la manipulación del producto. En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.



www.zumotec.com



+57 (7) 6717887  
317 5862151 - 315 3664272



Calle 6 #13-65 Bodega 1  
Bucaramanga- Colombia



gerencia@zumotec.com  
ventas@zumotec.com