

FICHA TÉCNICA

QUATERSOFT 5G DIRECT

Cód. DPF-065 – V. 1.0 – 2021/10/29

QUATERSOFT 5G DIRECT es un potente desinfectante microbicida formulado a base de amonios cuaternarios de última generación e indicado como agente de limpieza y desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental médico-odontológico y afines, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos. Producto biodegradable listo para usar, no es tóxico ni irritante. También es tuberculicida, fungicida y virucida.



REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2021DM-0024414



COMPOSICIÓN

Este producto está compuesto por:

- ✓ Amonios cuaternarios 5ª generación
- ✓ Excipientes.



PRESENTACIONES

500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL.

Utilizando tapa de seguridad y/o spray atomizador.



USOS

Se aplican en la desinfección de dispositivos médicos y equipos biomédicos, con el fin de prevenir y evitar la propagación y desarrollo de procesos infecciosos.



INSTRUCCIONES DE USO

Aplice la solución del producto directamente sobre la superficie del dispositivo médico y/o equipo biomédico a desinfectar, de tal forma que esta sea cubierta completamente por el producto y deje actuar. Recuerde que ningún desinfectante destruye los microorganismos de forma inmediata, por tanto, se requiere un tiempo mínimo de contacto entre el objetivo a desinfectar y el producto (5 minutos). Reduzca previamente la cantidad de carga orgánica. No es necesario enjuague con agua al finalizar el proceso.



VIDA ÚTIL:

La vida útil de este producto es de **36 meses** (según análisis de Estabilidad) conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- ✓ Evite el contacto con los ojos. En tal caso, lavar con abundante agua.
- ✓ Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

**Visoft**[®]

**zumotec**s.a.
ZUMO TECNOLOGIA
NIT. 804.009.960-3



www.zumotec.com



+57 (7) 6717887
317 5862151 - 315 3664272



Calle 6 #13-65 Bodega 1
Bucaramanga- Colombia



gerencia@zumotec.com
ventas@zumotec.com